

Einstellung der Gasdruckfeder Moizi 20 Austausch der Gasdruckfeder Moizi 20



Den Moizi 20 auf die Sitzfläche stellen. Auf eine saubere Unterlage achten.



Die Gasdruckfeder festhalten und durch kurze, feste Schläge mit einem Kunststoffhammer (bei einem Metallhammer ein Tuch zwischenlegen) auf die Auslösemechanik die Verbindung zum Konus lösen.



Einstellung der Auslösung an der Gasdruckfeder

Für Stehhilfe Moizi 20 middle und high

Löst die Stehhilfe selbständig aus: Die kleine Schraube an der Gasdruckfeder mit einem Kreuzschraubendreher bis zum Ende rein drehen und danach 2 Umdrehungen wieder heraus drehen.


Löst die Stehhilfe nicht aus: Die kleine Schraube an der Gasdruckfeder mit einem Kreuzschraubendreher bis zum Ende rein drehen und danach 4 Umdrehungen wieder heraus drehen.

Moizi 20 small sieh unten

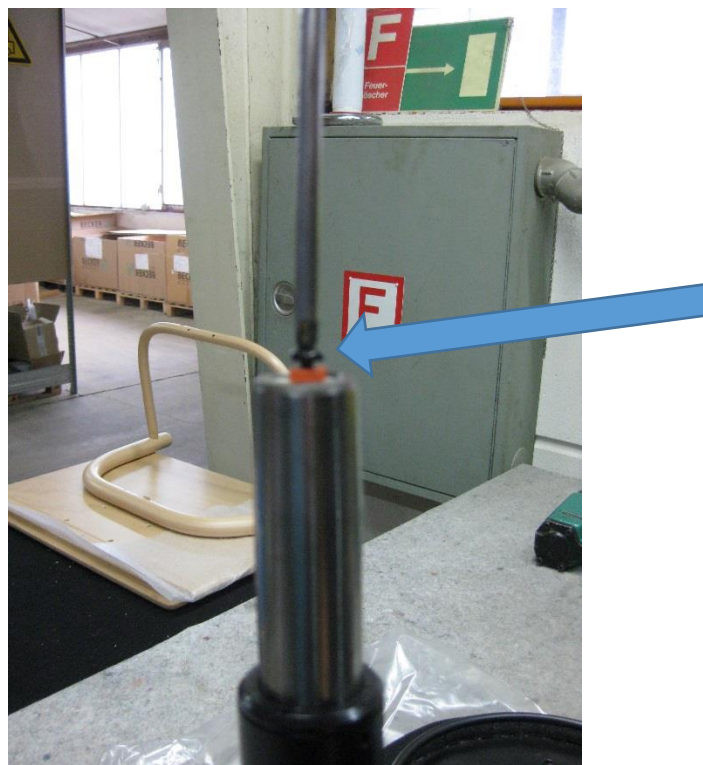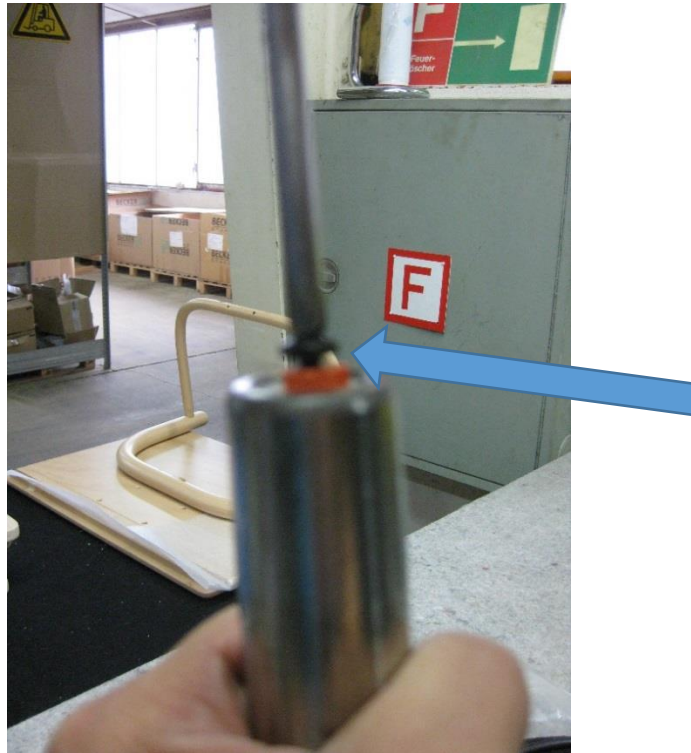

Für Stehhilfe Moizi 20 small, middle und high

Auch die 6-Kant-Schraube im Sitz mit einem 10er Inbusschlüssel bis zum Ende rein drehen und danach 2 Umdrehungen wieder heraus drehen.

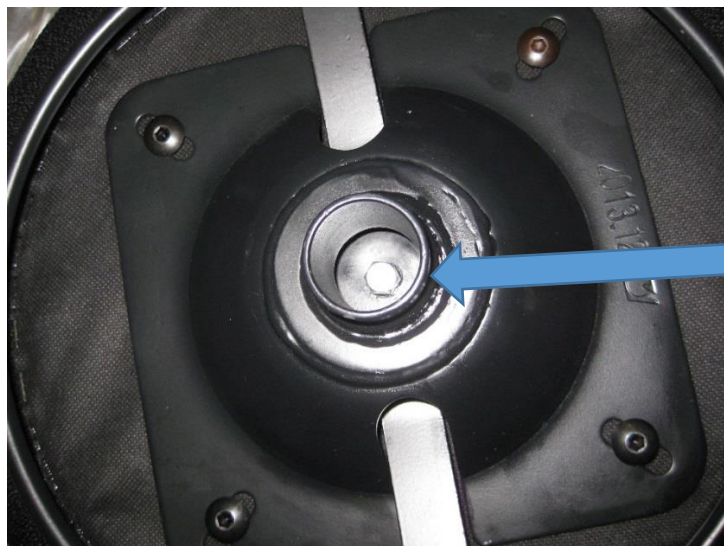

Nach der Einstellung den Sitz wieder auf die Gasdruckfeder aufsetzen und durch eine Sitzprobe die Auslösung testen. Ansonsten die Stellschrauben nachjustieren.

Für den Austausch der Gasdruckfeder

Nachdem der Polstersitz demontiert ist, die Gasdruckfeder festhalten und durch kurze feste Schläge mit einem Gummihammer auf den Fuß die Verbindung zum Konus lösen.

